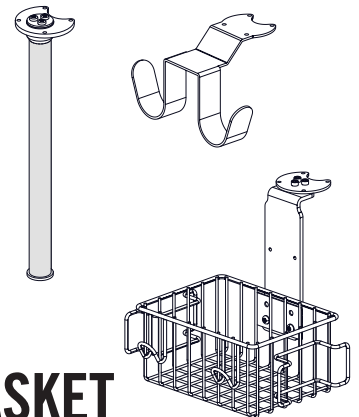


MONTAGEANLEITUNG

ZUBEHÖR**DOWN POST / KABELHAKEN / KORBBHALTER**

ASSEMBLY INSTRUCTION

ACCESSORIES**DOWN POST / CABLE HOOK / BRACKET FOR BASKET****WARNHINWEISE** 

Überprüfen Sie das Gewicht des zu befestigenden ME-Gerätes. Die zulässige Gewichtsbelastung finden Sie auf dem entsprechenden Produktdatenblatt.

Nichtbeachtung dieser Vorschrift kann zu Geräteschäden oder Verletzung von Personen führen.

Die CIM med GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht fachgerechte Montage entstanden sind.

Veränderungen am Produkt, Demontage einzelner Komponenten, Montage bzw. Zusammenbau der Einzelteile in anderer Form als nachfolgend beschrieben, sind nur nach ausdrücklicher und schriftlich erteilter Genehmigung durch die Konstruktionsabteilung der CIM med GmbH zulässig. Für Schäden, die durch nicht genehmigte Produktänderungen entstehen, übernimmt die CIM med GmbH keine Haftung.

Die weiterführende Gebrauchsanweisung und der Inspektionsplan sind für Endanwender bestimmt.

WARNING 

Please check the weight of the ME equipment to be mounted. The permissible total weight is mentioned on the corresponding data sheet.

Failure to follow these warnings may result in damage to equipment or injury to people.

CIM med GmbH cannot be held responsible for any damage due to poor installation.

Product modifications, disassembling and reassembling and/or mounting any of the components in any other way than described below are permitted only after written approval by the CIM med GmbH construction and engineering department. CIM med GmbH cannot be held responsible for any damage or injury caused by product modifications and/ or amendments without prior permission from CIM med GmbH.


The additional instructions for use and the inspection plan are intended for end users.

LIEFERUMFANG

SCOPE OF DELIVERY

Kabelhaken 2-fach
Dual cable hook

Z-KH2-70
Z-KH2-71

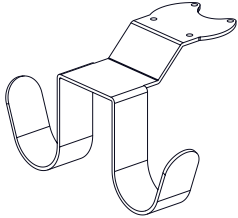


4x ISO 7380-M4x12

4x ø4,1

Kabelhaken 3-fach
Triple cable hook

Z-KH3-70
Z-KH3-71

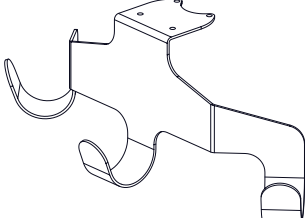


4x ISO 7380-M4x12

4x ø4,1

Kabelkralle
Down post with cable hook

Z-KH6-70
Z-KH6-71

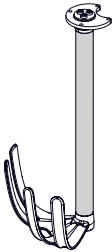


4x ISO 7380-M4x16

4x ø4,1

Down Post drehbar
Down Post turnable

Z-DPR-70
Z-DPR-71

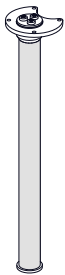


4x ISO 7380-M4x16

4x ø4,1

Korbhalter drehbar
Bracket for basket
with swivel function




Z-51-70
Z-51-71
Z-52-70
Z-52-71

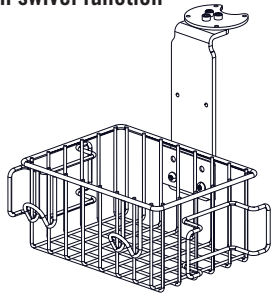

4x ISO 7380-M4x12


4x ø4,1

MONTAGEPOSITION / MOUNTING POSITION

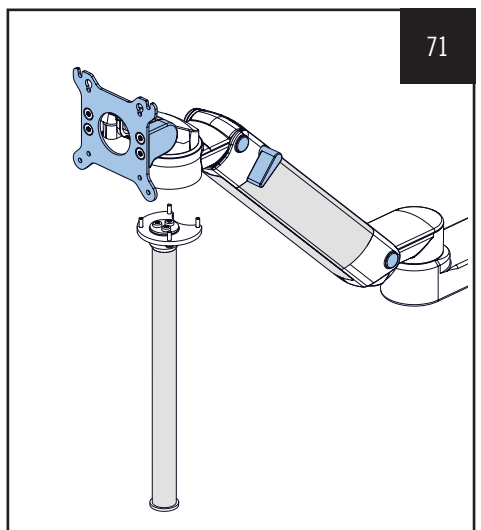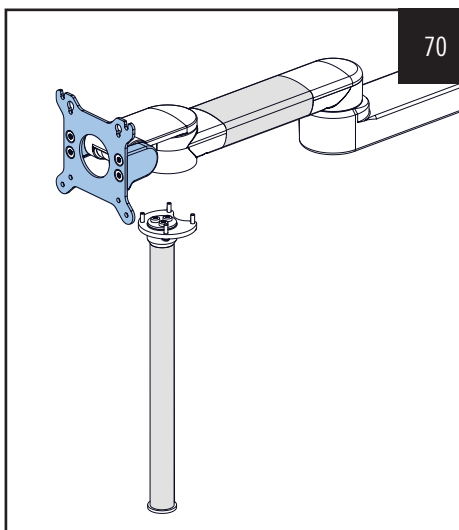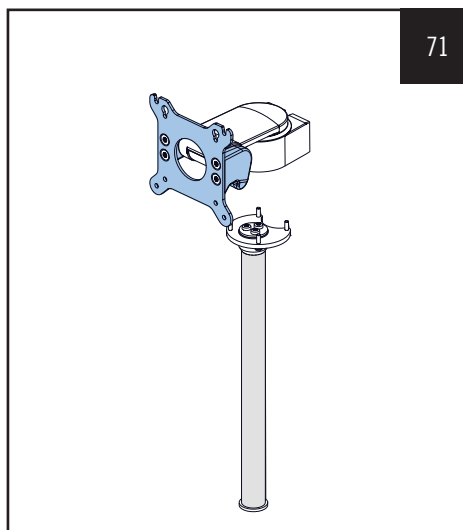


MONTAGESCHRITTE

ASSEMBLY STEPS

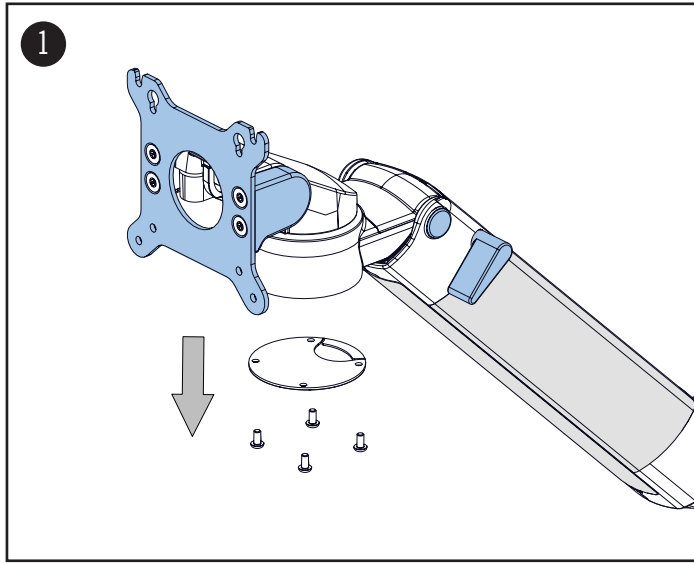

Entfernen Sie den Kunststoffdeckel. Remove the plastic cover.

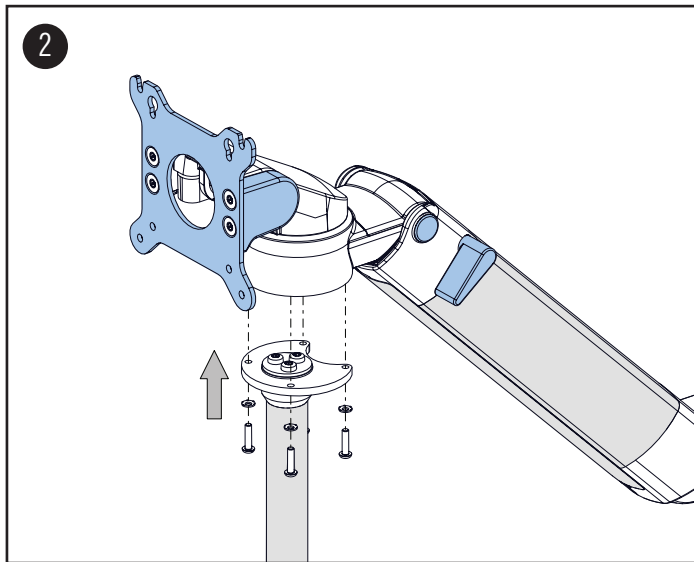

Montieren Sie den Down Post, Kabel- Mount down post, cable hook or haken bzw. Korbbhalter mit beiliegen- braket for basket with screws and dem Schraubensatz und den Kon- contact wheels set provided. taktscheiben.

⚠ ACHTUNG:
Verwenden Sie unbedingt die dem Zubehör beigelegten Schrauben und Scheiben!

⚠ WARNING:
It's essential to use the screws and washers delivered with the accessory.

