

Tischträger

MD

Monitoraufnahme

GE CARESCAPE ONE Adapter

Farbauswahl CD

 Dekorative Teile RAL 5013 kobaltblau/ RAL 7024 graphitgrau
 Aluminiumteile RAL 9016 verkehrsweiß/ RAL 9002 grauweiß

Max. Zuladung Monitoraufnahme

18 kg

Artikelnummer

 Tischträger mit Bodenplatte zum Verschrauben auf Tisch- oder Ablagefläche
 T-HGE-60.CD_220 Höhe 220 mm

 Tischträger freistehend (siehe Abb.)
 T-HGE-62.CD_220 Höhe 220 mm


 Tischträger ohne Bodenplatte
 T-HGE-69.CD_220 Höhe 220 mm

 Alle freistehenden Tischträger
 müssen in Abhängigkeit des
 Monitorgewichts auf Kippstabilität
 getestet werden!


Counter top

Technische Daten - Freistehend

SEITENANSICHT

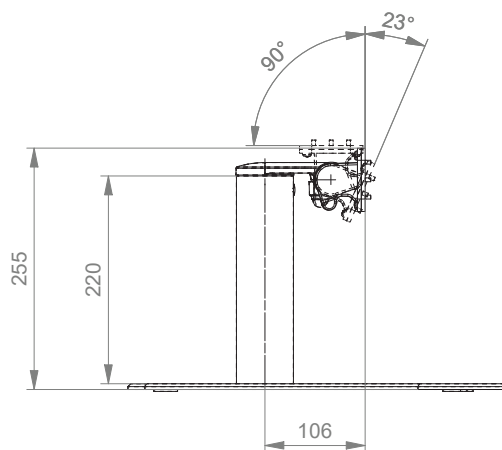

DRAUFSICHT

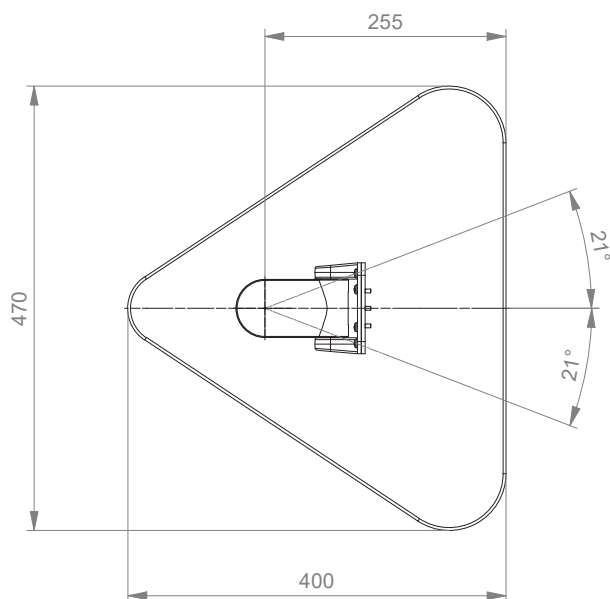

Erstellen von Artikelnummern

Bitte gehen Sie bei der Konfiguration der Artikelnummern wie folgt vor:

Alle Buchstaben in grün bitte mit dem entsprechenden Artikelnummern-Code ersetzen.

1. Komponentenerdung:

S	=	Nicht geerdet
A	=	Geerdet

2. Wählen Sie die gewünschte Tragarmvariante aus:

431G	=	Höhenverstellbarer Tragarm
910GE	=	Flush Mount
224GE / 230GE	=	Tragarm Pivot
33030GE	=	Dreigelenkarm Light Duty
431GE	=	Höhenverstellbarer Tragarm
73130GE	=	Höhenverstellbarer Dreigelenkarm

3. Spezifizieren Sie die Anbindung - wo wollen Sie Ihre Halterung befestigen (Y):

1V	=	Rundrohr ø 23 - 40 mm
1	=	Rundrohr ø 25 mm
1B	=	Rundrohr ø 30 mm
1F	=	Rundrohr ø 35 mm
1C	=	Rundrohr ø 38 mm
2F	=	Horizontale Normschiene 10 x 25, 8 x 35, 10 x 30, 10 x 50 mm
3	=	Vertikale Normschiene 10 x 25 mm
4S	=	Vertikaler Wandkanal
9	=	Löwenstein Medical / ITD / Montageschienen
13	=	Mindray Deckenstative
17	=	Amico Deckenstative
19	=	Dräger Ambia Deckenstative

Erstellen von Artikelnummern

4. Wählen Sie die Farbe der dekorativen Teile (C):

gr = RAL 7024 (graphitgrau)
bl = RAL 5013 (kobaltblau)

5. Wählen Sie die Farbe der Aluminiumdruckgussteile (D):

1 = RAL 9016 (verkehrsweiß)
2 = RAL 9002 (grauweiß)

6. Spezifizieren Sie die Federstärke gem. des Monitorgewichts - nur bei höhenverstellbaren Armen (X):

60 = 2 - 5 kg
130 = 7,5 - 13 kg
160 = 12,5 - 19 kg

Beispiel

01 Erdung		02 Armtyp		03 Adaption		04 & 05 Farbe		06 Federstärke
A	-	431GE	-	Y	.	CD	-	X
A	-	431GE	-	4S	.	gr1	-	60

Allgemeine Hinweise

Monitoraufnahme

Die verschiedenen GE Monitore erfordern unterschiedliche Monitoraufnahmen:

Die Monitoraufnahme mit 5" Montageplatte ist geeignet für folgende Monitore: **CARESCAPE B105/ B125/ B450/ B650**
Halterungen mit 5" Montageplatte finden Sie im Katalog:
Anbindung mit 5" Montageplatte.

CARESCAPE ONE, **Sensorhalter** und **Dockingstation** benötigen eine spezielle CARESCAPE ONE Monitoraufnahme.

Komponentenerdung

Alle Tragarme mit integrierter Kabelführung sind mit einer **Komponentenerdung** versehen. Bei externer oder teil-integrierter Kabelführung, bei der keine Kabel durch die Gelenke geführt werden, kann auf die Komponentenerdung verzichtet werden.

Gewichtsbelastung

Alle **höhenverstellbaren** Tragarme haben eine maximale Gewichtsbelastung von 22 kg. Bei rückseitigen Adaptionen und bodenseitigen Anbindungen mittels der 5" Montageplatte darf das Monitorgewicht maximal 18 kg betragen. Weitere 4 kg können beispielsweise über einen Down Post unterhalb des vorderen Drehgelenks befestigt werden. Je nach Material und dessen Bruchdehnung haben alle Gewichtsangaben einen 4- bzw. 6-fachen Sicherheitsfaktor gemäß den Regularien IEC 60601-1.

Sonderlösungen und Anwendungen im Kernspinbereich/ MRI

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie **kundenspezifische** Lösungen suchen.

Produktkennzeichnung

Alle als Medizinprodukte der Klasse 1 deklarierten Produkte sind CE gekennzeichnet. Als **Medizinprodukt der Risikoklasse 1** entsprechen sie den Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 (MDR) und sind konform mit den Regularien IEC 60601-1. Andere Normen der IEC 60601-Reihe gelten unabhängig von ihrer Version nicht für unsere Produkte.

MD Funktional eigenständiges Produkt, welches bereits vor Integration in ein Gesamtgerät als Medizinprodukt in die Klasse 1 eingeordnet wird. Das Produkt ist mit CE-Kennzeichnung versehen. Eine Konformitätserklärung ist vorhanden.

NO Zubehör oder Ersatzteile, die keine eigenständige Funktion haben und somit nicht der MDR unterliegen. Eine Konformitätserklärung oder CE-Kennzeichnung dieser Produkte ist daher nicht erforderlich.

Gewährleistung

Alle CIM Produkte haben ab Lieferdatum eine 5-jährige Gewährleistung auf Material und Funktionsfähigkeit.

Wie finden Sie das passende Produkt für Ihren Bedarf?

Ganz einfach mit unserem Konfigurator

<https://cim-configurator.com>

